




Hundeallergie Test

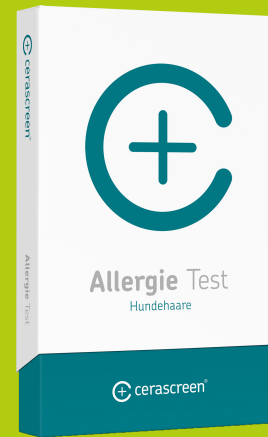

Allergie gegen Hundehaare

Allergisch gegen Hunde? Eine Hundeallergie kann unter anderem zu geröteten Augen, Juckreiz auf der Haut und Atemwegsbeschwerden wie Husten und Schnupfen führen und sogar allergisches Asthma wahrscheinlicher machen.

Mit dem cerascreen® Hundehaarallergie Test erhalten Sie einen wertvollen Hinweis auf eine mögliche Allergie. Der Test bestimmt dazu die Anzahl spezifischer IgE-Antikörper für die Allergene von Hunde-Hautschuppen in Ihrem Blut.

- + Sensibilisierung gegen Hunde
- + zuhause Blutprobe nehmen – einfach + bequem
- + professionelle Analyse im medizinischen Fachlabor
- + Empfehlungen zum Umgang mit Hundehaarallergie
- + Ergebnis innerhalb von wenigen Tagen nach Probeneingang
- + inkl. 15-minütige Telefonberatung für weitere Fragen

Unsere Expertise für Sie

Cerascreen® ist Marktführer für medizinische Probenahme- und Einsende-Testkits in Europa, mit über 10-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 65 diagnostische Testkits für alle Biomarker-Typen entwickelt, mehr als 500.000 Proben ausgewertet und beliefern über 20 Länder.



Testen, welche Probleme es gibt und wie Ihr Körper auf Einflüsse von außen reagiert



Wissen, wie Nährstoffe, Umweltfaktoren und Lebensstil mit Gesundheit und Wohlbefinden zusammenhängen.



Handeln, durch Lebensstil, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und gegebenenfalls Therapien. Gesundheit und Leistungsfähigkeit optimieren und Krankheiten vorbeugen.



Wie funktioniert der Test?

1. Zuhause testen



Ihr Testkit enthält alles, was Sie für die Entnahme einer kleinen Blutprobe aus Ihrer Fingerspitze brauchen. Anschließend schicken Sie die Probe im beiliegenden Rücksendeumschlag kostenfrei an unser medizinisches Fachlabor.

2. Ergebnisse online ansehen



Nach der Auswertung im medizinischen Fachlabor erhalten Sie online Zugriff auf Ihren persönlichen Ergebnisbericht.

3. Handeln



Ihr Zugang zu den Testergebnissen sowie zu den evidenzbasierten Erkenntnissen und Tipps, um Ihre Gesundheit zu verbessern: das mein cerascreen®-Nutzerprofil auf unserer Website oder unserer App.

Hundeallergie Test

Der Hundeallergie Test ist für bestimmte Personengruppen nicht oder nur eingeschränkt geeignet:

- + Menschen mit ansteckenden Krankheiten wie Hepatitis und HIV dürfen den Hundeallergie Test nicht durchführen.
- + Menschen mit der Bluterkrankheit (Hämophilie) sollten den Bluttest nicht durchführen.
- + Schwangere und stillende Frauen sollten den Hundeallergie Test nur unter ärztlicher Begleitung durchführen. Für sie gelten auch die Referenzwerte und Empfehlungen nicht oder nur eingeschränkt, sie sollten sich Anweisungen zum Testergebnis von Ihrem Arzt oder Therapeuten einholen.
- + Der Hundeallergie Test eignet sich nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
- + Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen zum Hundeallergie Test:

<https://www.cerascreen.at/products/hundeallergie-test>



PZN 5638380

Dieses Kit kann nur innerhalb Österreichs
kostenlos zurückgesendet werden.

